




EXPERT 8^{DUO}

Linia **Advanced**

Liczba komór	8
Max. ciśnienie [mmHg]	220
Programy terapeutyczne opracowane przez Polskie Towarzystwo Limfologiczne	13
Funkcje dla osób niedowidzących/niewidomych	asystent głosowy + specjalna klawiatura
Inteligentna funkcja Gradientu	(mmHg, %, ciśnienie końcowe)
Funkcja Hold [s]	1-50
Funkcja Interwał [s]	1-50
Precyzyjna regulacja ciśnienia i czasu	co 1, 5, 10
Indywidualne ciśnienie w każdej komorze	tak
Liczba niezależnych kanałów	2
Regulacja tempa zabiegu	1-5
Mankiety	system overlapping
Własne programy użytkownika	tak
Lista ulubionych programów	tak
Ekran	9" dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD
Waga [kg]	5,5
Wymiary [mm]	385 x 310 x 180
Zasilanie	100÷240 V, 50÷60 Hz
Pobór mocy	60-120W
Gwarancja	2 lata




W zestawie

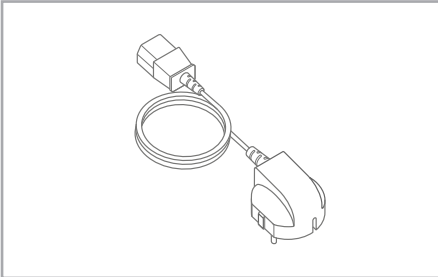


Kabel zasilający

Opcjonalne:

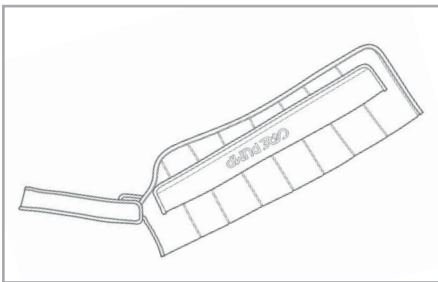


8-komorowy mankiet na rękę

CPARM8T

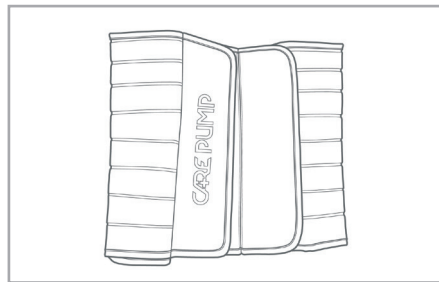


8-komorowy pas na biodra i brzuch

CPWAIST8T

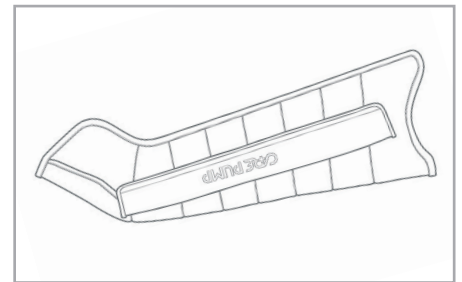


8-komorowy mankiet na nogę lewą

CPLEG8TL

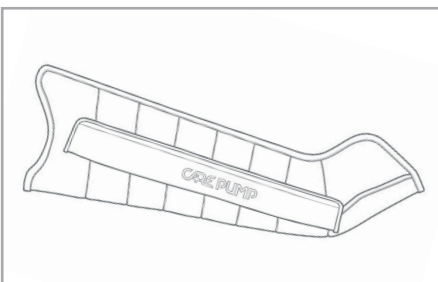


8-komorowy mankiet na nogę prawą

CPLEG8TR

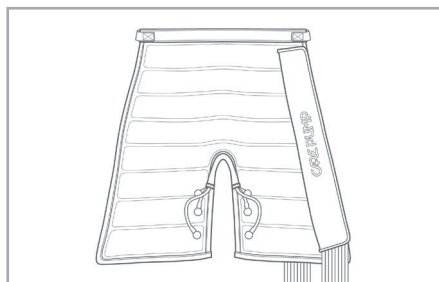


8-komorowy mankiet krótkie spodnie

CPSHORTPANTS8T

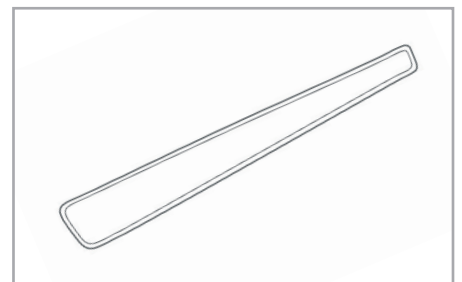


Poszerzacz do 8-komorowych mankietów na nogi

CPLEGEXT8

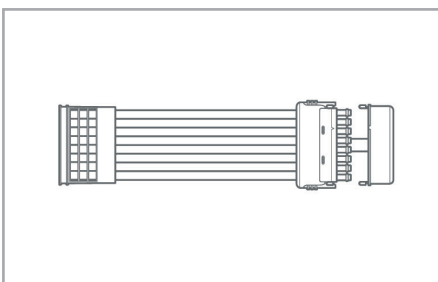


Rozdzielacz przewodów powietrznych

CPDOUBLECONNECTOR8

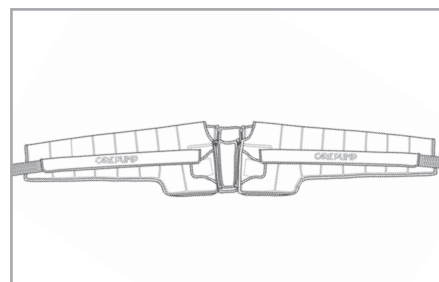


8 komór - mankiet podwójny na rękę, barki i klatkę piersiową

CPDOUBLEARM8T

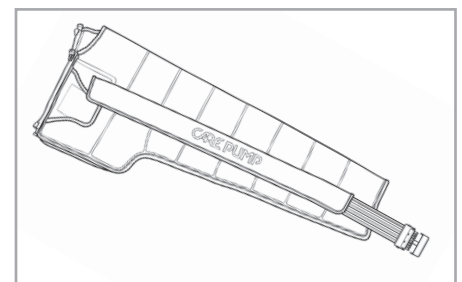


8 komór - mankiet na lewą rękę, barki i pierś

CPARMSB8TL

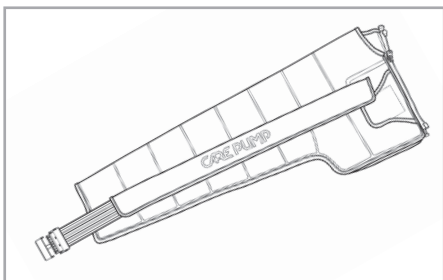


8 komór - mankiet na prawą rękę, bark i pierś

CPARMSB8TR

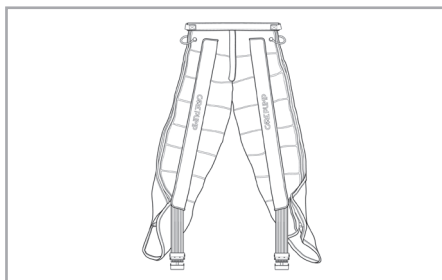


8 komór - mankiet - długie spodnie

CPLONGPANTS8T

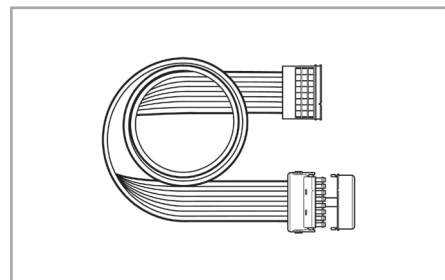


8 komór - rozdzielacz przewodów powietrznych (długość - 1,5 m)

CPDOUBLECONNECTOR8L

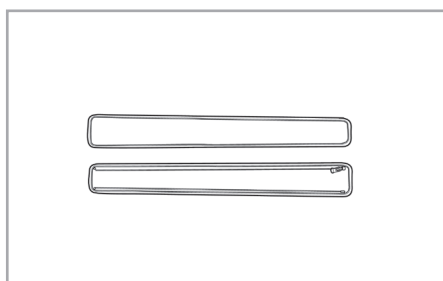


8 komór - 2x poszerzacz do mankietu krótkie spodnie

CPSHORTPANTSEXT8

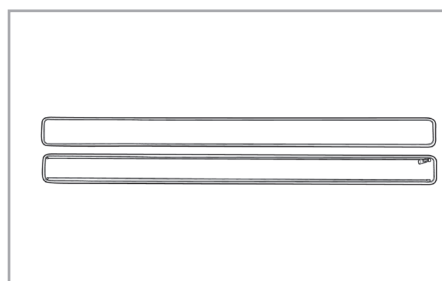

8 komór - 2 x poszerzacz do mankietu długie spodnie

CPLONGPANTSEXT8

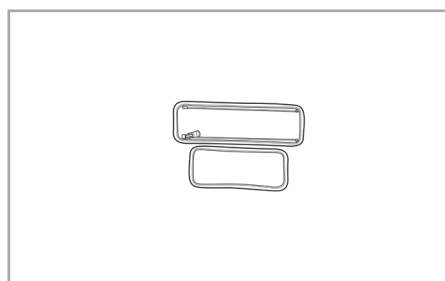

8 komór - 2x poszerzacz do mankietu podwójnego na rękę, barki i klatkę piersiową


CPDOUBLEARMEXT8

Programy terapeutyczne

opracowane przez Polskie Towarzystwo Limfologiczne




obrzęk limfatyczny 1

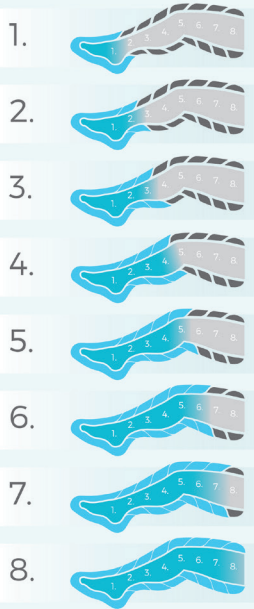


Gradient	1 mmHg
Zalecany czas zabiegu	50 min.
Hold	3 s
Interval	3 s

obrzęk limfatyczny 2

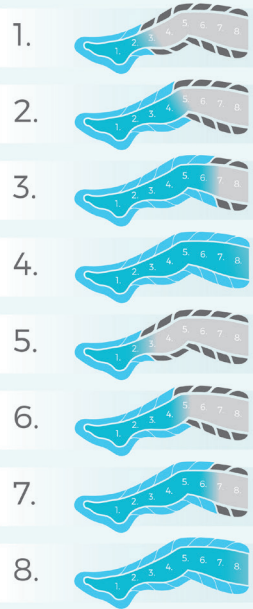


Gradient	1 mmHg
Zalecany czas zabiegu	50 min.
Hold	3 s
Interval	3 s

obrzęk limfatyczny 3

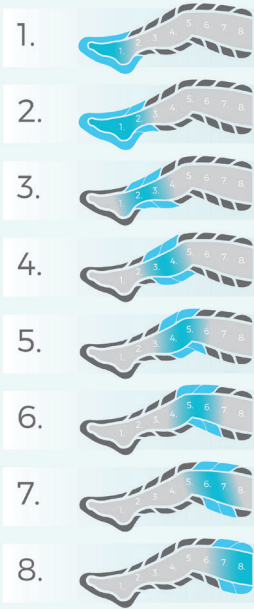


Gradient	1 mmHg
Zalecany czas zabiegu	50 min.
Hold	3 s
Interval	0 s

obrzęk limfatyczny 4

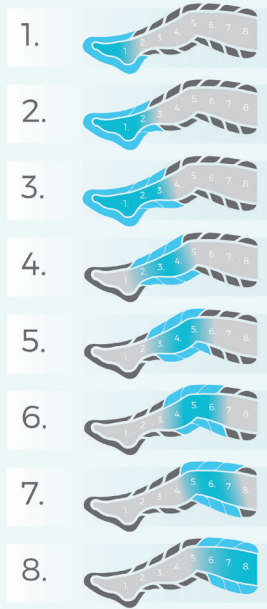


Gradient	1 mmHg
Zalecany czas zabiegu	50 min.
Hold	3 s
Interval	0 s

obrzęk żylny 1

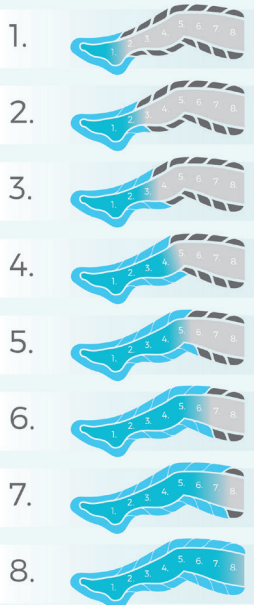


Gradient	3 mmHg
Zalecany czas zabiegu	45 min.
Hold	2 s
Interval	3 s

obrzęk żylny 2

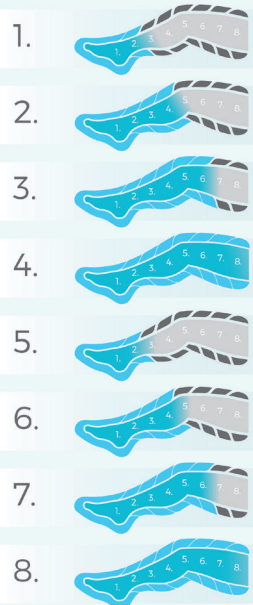


Gradient	3 mmHg
Zalecany czas zabiegu	45 min.
Hold	2 s
Interval	2 s

obrzęk tłuszczowy 1

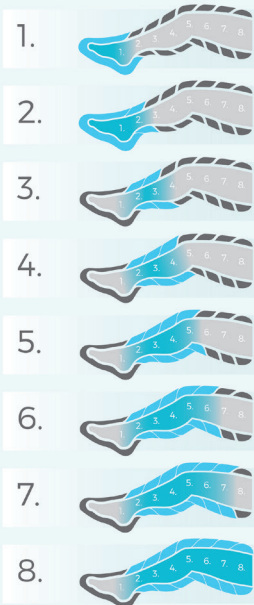


Gradient	2 mmHg
Zalecany czas zabiegu	60 min.
Hold	3 s
Interval	3 s

obrzęk tłuszczowy 2

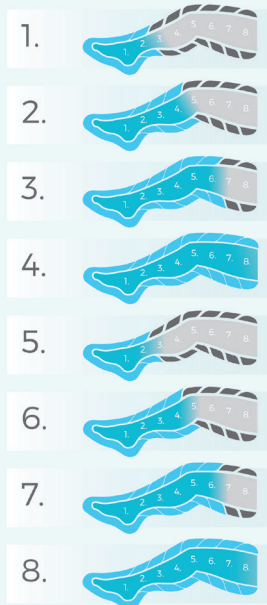


Gradient	2 mmHg
Zalecany czas zabiegu	60 min.
Hold	3 s
Interval	3 s

terapia pourazowa

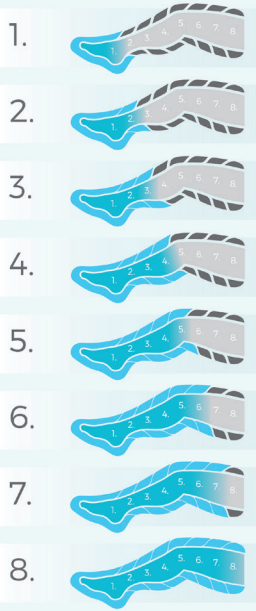


Gradient	4 mmHg
Zalecany czas zabiegu	30 min.
Hold	2 s
Interval	2 s

profilaktyka, relaksacja

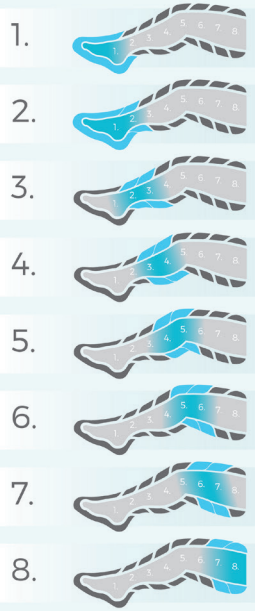


Gradient	0 mmHg
Zalecany czas zabiegu	60 min.
Hold	2 s
Interval	2 s

cellulit **advanced**

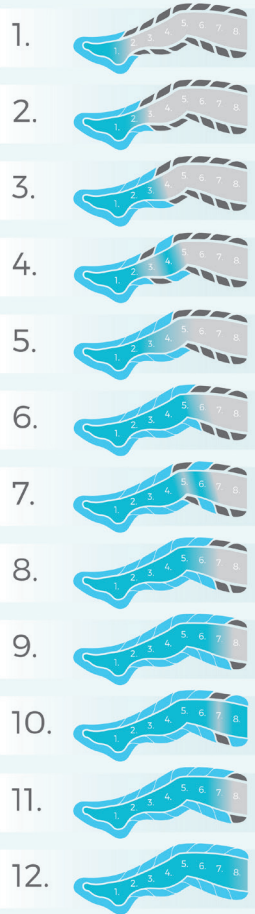


Gradient	1 mmHg
Zalecany czas zabiegu	60 min.
Hold	1 s
Interval	2 s

regeneracja

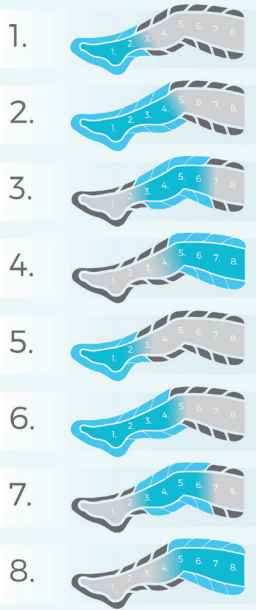

Gradient	4 mmHg
Zalecany czas zabiegu	45 min.
Hold	2 s
Interval	2 s

masaż globalny

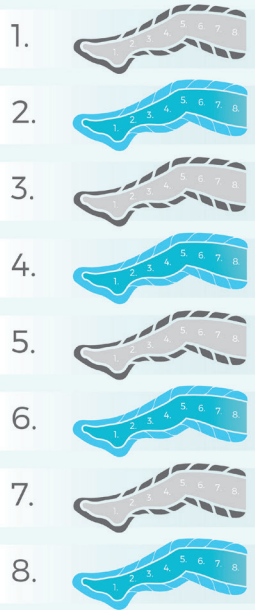

Gradient	0 mmHg
Zalecany czas zabiegu	30 min.
Hold	2 s
Interval	3 s